

添付文書

2010年2月16日作成（第1版）

届出番号 12B1X10009000010

医療用品（4） 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材
JMDNコード 34654000

再使用禁止

アルジメルト

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造等】

不織布にアルギン酸発泡体からなる吸収体を付したもの。

【使用目的、効能・効果】

術後創傷の被覆・保護に用いる。

【品目仕様】

滅菌済

【使用方法】

創傷面を清潔にし、アルギン酸発泡体面（フィルム面の反対面）をあててテープ等で固定する。

【使用上の注意】

- ・傷に化膿や熱、腫れのある場合は使用しないこと。
- ・傷に固着したゲルは擦り取らず水道水又は滅菌生理食塩水等で洗い流すこと。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
- ・滅菌してあるので開封後はすみやかに使用すること。
- ・開封・破損・汚染等が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。

【貯蔵方法及び使用期限】

- ・貯蔵方法：直射日光及び高温の場所を避ける。
- ・使用期限：3年（当社データによる）

【包装】

サイズ 50mm×50mm 1枚入/袋 品番：AM5050

【製造販売業者の名称及び住所】

光洋産業株式会社 〒289-1537 千葉県山武市松尾町借毛本郷 665 TEL：0479-86-4141
お問合せ先 TEL：03-3252-1705

【製造業者の名称及び住所】

光洋産業株式会社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目 14 番 7 号