

** 2010年6月1日改訂(第5版)
* 2009年5月13日改訂(第4版)

* 届出番号 : 09B1X00004000112

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 排液バック 70308000

シラスコン®排液バッグ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

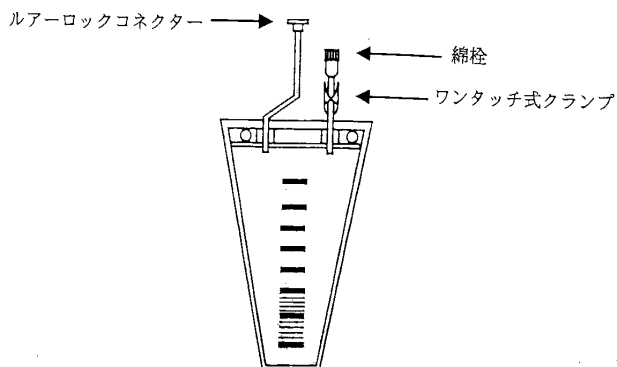

【使用目的、効能又は効果】

- 脳室ドレナージの排液バッグとして使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品のルアーロックコネクタ（メス：青色）と脳室ドレナージ回路のルアーコネクタ（オス：青色）を接続する。
- **2. 本品をバッグ用ハンガー等を用いてベッドサイド又は点滴ポールに設置する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. シラスコン®脳室ドレナージ回路と組み合わせて使用すること。
[この医療機器以外と組み合わせて使用した場合、本品は性能を発揮できない場合がある。]
2. 併用する脳室ドレナージ回路との接続は確実にすること。
- **3. 本品を設置する際は、落下しないように固定すること。
4. 患者を移動する場合には、必ずワンタッチ式クランプを閉鎖し、綿栓を濡らさないこと。
5. ドレナージを再開する時は、ワンタッチ式クランプが開放されていることを確認すること。
6. 併用する医療機器については、その医療機器の添付文書に従って使用すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 医師、又は医師の指導監督のもとで看護師が使用すること。
- 本品にメス、はさみ等で傷をつけないこと。[液漏れや、切断の恐れがある。]

【その他の注意】

- 本品又は包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。

【使用期限】

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。使用期限を過ぎたものは使用しないこと。[自己認証による]

【包装】

10 枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
栃木県佐野市大橋町 1647
電話番号 0283-22-2801

【製造元】

フォルテグロウメディカル株式会社
フォルテグロウメディカル ベトナム
(FORTE GROW MEDICAL VIETNAM CO., LTD.) ベトナム

【販売元】

株式会社 カネカメディックス
〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4
電話番号 06-6226-5256