

\*\* 2009年5月13日改訂(第4版)  
\* 2008年3月29日改訂(第3版)

\*\* 届出番号 : 09B1X00004000111

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 排液バッグ 70308000

## シラスコン®閉鎖式排液バッグ


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

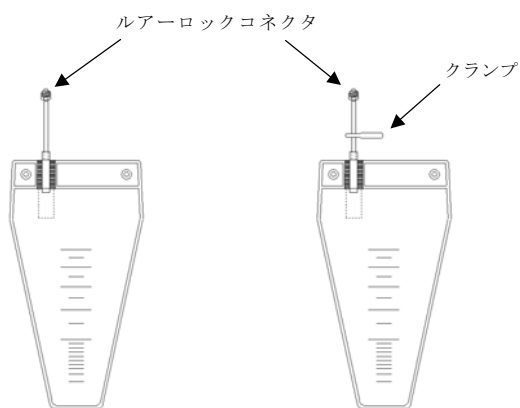

クランプ無 (781-1N)

クランプ付 (781-2N)

### 【使用目的、効能又は効果】

- 脳室ドレナージの排液バッグとして使用する。

### 【操作方法又は使用方法等】

1. 本品のルアーロックコネクタ（オス：白色）と、血腫等のドレナージ用カテーテルのコネクタとを接続する。
2. 症例、病態に応じた排出量を勘案し、適正な高さに設定して本品を使用すること。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品は設置位置により排液量に変化するため、適正な高さに設置すること。
2. 本品はシラスコン®脳室ドレナージ回路と接続できないので注意すること。
3. 併用する医療機器については、その医療機器の添付文書に従って使用すること。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- 医師、又は医師の指導監督のもとで看護師が使用すること。
- 本品にメス、はさみ等で傷をつけないこと。[液漏れや、切断の恐れがある。]

#### 【その他の注意】

- 本品又は包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として処理すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 【貯蔵・保管方法】

- 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
- \* 【使用期限】
- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。使用期限を過ぎたものは使用しないこと。[自己認証による]

### 【包装】

10 枚/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社  
栃木県佐野市大橋町 1647  
電話番号 0283-22-2801

#### \* 【製造元】

フォルテグロウメディカル株式会社  
フォルテグロウメディカル ベトナム  
(FORTE GROW MEDICAL VIETNAM CO., LTD.) ベトナム

#### 【販売元】

株式会社 カネカメディックス  
〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4  
電話番号 06-6226-5256