

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 70306000
シラスコン® <ラジオペーク>ペンローズドレーン
(Aタイプ)
(Fタイプ)

再使用禁止

【警告】


本品を絹糸等で皮膚固定した場合は、固定部位を適宜確認すること。〔固定部位から切断し、体内に脱落することがある。〕

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<Aタイプ>

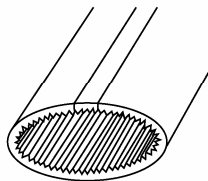

<Fタイプ>

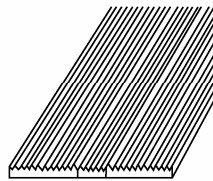

材質： シリコーンゴム

* **【使用目的、効能又は効果】**

体内に留置して手術後の排液を体外に誘導するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 術後、滲出液の最も貯留しやすい部位にドレーンチューブの先端を留置する。
2. 皮膚刺入部で、絹糸を用いて縫合し、さらに手術用テープ等で皮膚に固定する。
3. ドレーンチューブ後端部を滅菌ガーゼなどのドレッシング材で保護する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品にメス、はさみ等で傷を付けないようにすること。〔切断の恐れがある。〕

【使用上の注意】

【不具合・有害事象】

術後、以下の不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1. 異物作用
2. 逆行性感染
3. 腹腔内脱落
4. 癒着、イレウス

【その他の注意】

1. 本品または包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
- *2. 外箱に使用期限を記載〔自己認証(当社データ)による〕。
使用期限切れのものは、使用しないこと。

【包装】

10本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売元】

名 称：株式会社カネカ
住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島3-2-4
電話番号：06-6226-5256

【製造元】

名 称：株式会社カネカメディックス
住 所：〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4

【販売元の氏名又は名称及び住所等】

名 称：株式会社カネカメディックス
住 所：〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4