

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 排液用チューブ 14191102

シラスコン®〈ラジオペーク〉医療用チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【包装】

10m/袋

【形状・構造及び原理等】

カタログ番号	内径-外径 (mm)	タイプ
100-3R	2.5-4.0	SHR
100-4R	4.0-5.5	SHR
100-5R	5.0-7.0	SHR
100-6R	6.0-8.0	SHR
100-7R	7.0-9.5	SHR
100-8R	8.0-11.0	SHR
100-9R	8.0-12.0	SHR
100-10R	10.0-14.0	SHR

材質 シリコーンゴム

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売元]

名 称：株式会社カネカ

住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島 3-2-4

電話番号：06-6226-5256

[製造元]

名 称：株式会社カネカメディックス

住 所：〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4

* 【使用目的、効能又は効果】

腔、創傷又は感染部位から浸出液又は膿状物質の除去に用いる。

【販売元の氏名又は名称及び住所等】

名 称：株式会社カネカメディックス

住 所：〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用目的に合わせチューブを適当な長さに切る。
2. 使用前に必ず洗浄し、高圧蒸気滅菌又はエチレンオキシドガス滅菌を行なう。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 長さ調節（切断）以外はチューブを加工しないこと。
2. 日本薬局方の条件に基づいて滅菌を行なうこと。

【使用上の注意】

[相互作用]

1. 水溶性物質に影響を受けることはないが、エーテル、クロロホルム、ベンゼン、キシレン等の溶剤によって膨張するので注意すること。
2. 弱酸や弱塩基に対して著しく変化はしないが、濃酸や濃塩基によっては破壊されるので注意すること。

[その他の注意]

1. 本品または包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 使用後は医療廃棄物として処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 開封後の残りのチューブは再密封して保管すること。