

2018年6月吉日

取引先各位

製造販売元：株式会社カネカ

販売元：株式会社カネカメディックス

吸着型血漿浄化器「リポソーバー」及び「セレスープ」の
血漿入出口ノズルの形状 及び カラム材質 の変更のお知らせと在庫調整のお願い

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社製品「リポソーバー」及び「セレスープ」の血漿流入口および出口のノズル形状を、カネカ専用のロック形状からルアロック形状（ISO 8637 適合）に、また、カラム材質をポリカーボネートからポリプロピレンに変更致します。変更内容の詳細につきましては、別紙をご参照下さい。

尚、本変更に伴い、専用血液回路 NK-M3R（製造販売元：日機装株式会社）の吸着器接続部コネクタもルアロック形状（ISO 8637 適合）に変更致しますことご報告申し上げます。

また、治療現場でご使用方法に変更はございませんが、カラムと専用血液回路との接続に関しては、現行品と変更品との互換性がないので異なった形状の際は治療が出来ないこととなります。（変更後のカラムは、変更前の専用血液回路とは接続できません）

ルアロック形状製品が梱包されていることが識別できるよう、製品箱および輸送箱に「ルアロック型」と識別表示致しますので、ご使用に際しては識別表示を必ずご確認ください、互換性を確認の上ご使用頂きます様お願い申し上げます。

「リポソーバー」に関しては、2018年8月1日以降は、現行カラムは販売終了し専用血液回路のみ現行品も併売させていただきますが、3ヶ月間の期間限定の予定です。「リポソーバー」カラムと専用血液回路の在庫数量に差分がある場合は、予め単品発注により同数に調整することをご検討頂きます様お願い申し上げます。

「セレスープ」の対応につきましては改めてご案内致します。

お取引先の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

今後とも医療現場でお役に立てる製品をご提供させて頂く所存でおりますので、引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

- 対象製品： 「リポソーバー」及び「セレスープ」のカラム と 専用血液回路
- 変更日： リポソーバー 2018年8月1日ご発注分
セレスープ 改めてご案内致し申し上げます
・別紙に記します JAN コードをご確認の上、変更品をご発注下さい。

- 変更内容： 別紙参照

上記変更内容につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問い合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。








以上

●リポソーパー LA-15

	従来品	変更後
製品カラム	 <p>材質：ポリカーボネート (カラム本体は透明) 血漿出入口形状：カネカ専用ロック</p>	 <p>材質：ポリプロピレン (カラム本体は乳白色不透明) 血漿出入口形状：ルアロック ※承認番号、型式及び JAN コードは不変</p>
血液回路	<p>型式：NK-M3R JAN コード：4987671100023 吸着器接続コネクタ：カネカ専用ロック</p>   <p>流入口形状 流出口形状</p>	<p>型式：NK-M3R(L) JAN コード：4987671100115 吸着器接続コネクタ：ルアロック</p>  <p>流入口及び流出口は同形状 (ISO 8637 適合) ※認証番号は不変</p>
製品箱の 識別表示		 <p>ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer"</p> <p>ルアロック型の表示追加</p>
輸送箱の 識別表示		 <p>ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer"</p> <p>ルアロック型の表示追加</p>

●リポソーマー LA-40S

	従来品	変更後
製品カラム	 <p>材質：ポリカーボネート (カラム本体は透明)</p>	 <p>材質：ポリプロピレン (カラム本体は乳白色不透明) <u>血漿出入口形状は変更なし (ルアロック型)</u> 封止用栓の仕様変更 ※承認番号、型式及び JAN コードは不変</p>
製品箱の識 別表示	製品箱と緩衝材は別々	製品箱と緩衝材が一体化
輸送箱の識 別表示		封止用栓の長さ短縮に伴う小型化

	従来品	変更後
製品カラム	 <p>材質：ポリカーボネート (カラム本体は透明な材質) 血漿出入口形状：カネカ専用ロック</p>	 <p>材質：ポリプロピレン (カラム本体は乳白色の材質) 血漿出入口形状：ルアロック</p>
血液回路	<p>型式：NK-M3R JAN コード：4987671100023 吸着器接続コネクタ：カネカ専用ロック</p>   <p>流入口形状 流出口形状</p>	<p>型式：NK-M3R(L) JAN コード：4987671100115 吸着器接続コネクタ：ルアロック</p>  <p>流入口及び流出口は同形状 (ISO 8637 適合) ※認証番号は不変</p>
製品箱の識別表示		 <p>ルアロック型 Type "Luer lock" Typ „Luer-Lock“ Type « serrure de Luer » Tipo "Luer lock" Tipo "cerradura Luer"</p> <p>ルアロック型の表示追加</p>
輸送箱の識別表示	変更なし	