

取引先各位

販売元：株式会社カネカメディックス

膜型血漿分離器「サルフラックス FP」の血漿ポート形状変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、膜型血漿分離器「サルフラックス FP」（製造販売元：旭化成メディカル株式会社）の血漿ポート形状変更及び、それに伴うリポソーバー用の専用血液回路 NK-M3R(L)（製造販売元：日機装株式会社）の血漿側接続部コネクタの形状変更を予定しております。変更内容の詳細につきましては、別紙をご参照下さい。

なお、既存品から新血漿ポート品へのスムーズな転換を進める目的で、新血漿ポート品「サルフラックス FP」の発売に先立ち、既存／新血漿ポート両方の「サルフラックス FP」との接続が可能な『中間コネクタ付血液回路 NK-M3R(AD)』を先行して発売致します。『中間コネクタ付血液回路』には新ポートに対応した専用血液回路に別袋で中間コネクタ（中間コネクタ1本と既存ポート用血漿圧ライン1本）が同梱されております。『中間コネクタ付血液回路の使用法』につきましては、改めてご連絡致します。

この『中間コネクタ付血液回路』は、2019年4月以降に販売開始致しますが、「サルフラックス FP」の流通在庫が新血漿ポート品に切り替わるまでの一時的な販売となります（ご注意：中間コネクタ単品の販売は致しかねますのでご了承下さい）。引き続き新血漿ポートタイプの「サルフラックス FP」及び新血漿ポート対応血液回路 NK-M3R(D)の販売開始は2019年9月以降を予定しております。

お取引先の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

■ サルフラックス FP

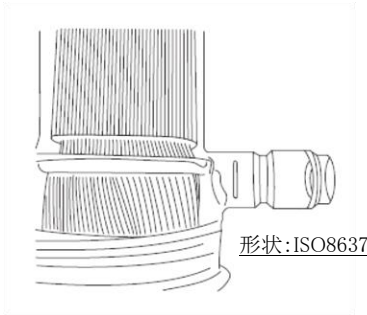
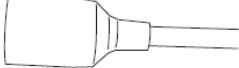
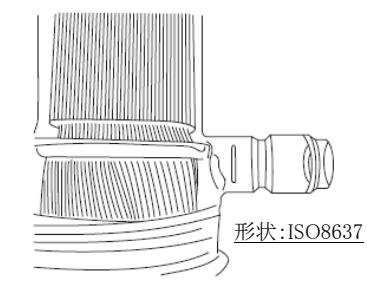
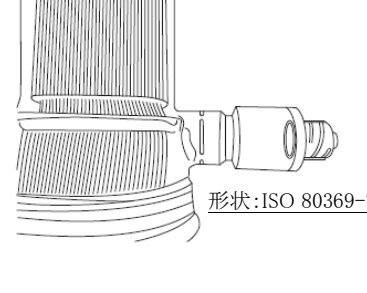

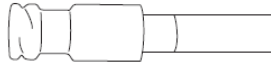
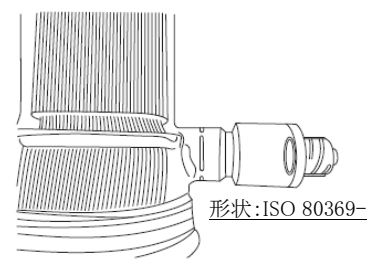
	既存品	新血漿ポート品
カタログ番号	FP-02/FP-05/FP-08	FP-02D/FP-05D/FP-08D
JANコード	FP-02 : 4537693900578 FP-05 : 4537693900585 FP-08 : 4537693900592	FP-02D : 4537693900936 FP-05D : 4537693900943 FP-08D : 4537693900950
製品箱と輸送箱の 識別表示	—	新血漿 ポート

■ 専用血液回路

	既存品	中間コネクタ付品	新血漿ポート品
カタログ番号	NK-M3R(L)	NK-M3R(AD)	NK-M3R(D)
JANコード	4987671100115	4987671100153	4987671100207
製品箱と輸送箱の 識別表示	—	血漿ポート用中間コネクタ付属 血漿分離器の接続部形状を ご確認の上、ご使用ください	新血漿ポート対応

上記変更内容につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

以上

使用する血液回路	膜型血漿分離器「サルフラックス FP」	専用血液回路
<p>既存品</p>	<p>既存品</p>  <p>形状:ISO8637</p>	<p>既存品 : NK-M3R (L)</p> <p>血漿ポート接続部分</p> 
<p>中間コネクタ付品</p>	<p>既存品</p>  <p>形状:ISO8637</p> <p>新血漿ポート品</p>  <p>形状:ISO 80369-7</p>	<p>中間コネクタ付血液回路 : NK-M3R (AD)</p> <p><u>膜型血漿分離器が既存品の場合は中間コネクタをご使用下さい。</u></p> <p>血漿ポート接続部分</p>  <p><u>膜型血漿分離器が新血漿ポート品の場合は中間コネクタを用いずに新血漿ポート対応血漿圧ラインをご接続下さい。</u></p> <p>血漿ポート接続部分</p>  <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>中間コネクタ付品には中間コネクタ 1 本と血漿圧ライン（新旧用各 1 本ずつ） 2 本が同梱されています。</p> <p>血漿ポート部の形状に合致した血漿圧ラインをご使用下さい。</p> </div>
<p>新血漿ポート品</p>	<p>新血漿ポート品</p>  <p>形状:ISO 80369-7</p>	<p>新血漿ポート対応血液回路 : NK-M3R (D)</p> <p>血漿ポート接続部分</p> 