

2022 年 2 月 吉日

取引先各位

株式会社カネカメディックス

血液浄化用血液回路 KMT-K006 の欠品に伴う代替品ご使用のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、製造販売元の SB カワスミ株式会社より、下記対象製品につきまして、欠品に伴う代替品の案内がございましたので、ご査収くださいますよう、お願い申し上げます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、今後とも引き続き弊社製品をご愛顧戴きますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：

販売名	カタログ番号	医療機器認証番号
血液浄化用血液回路 (腹水濾過濃縮用血液回路)	KMT-K006	21500BZZ00312000

上記につきましてご不明な点に関しましては、弊社営業担当までお問合せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

2022 年 2 月

お客様各位

血液浄化用回路 KMT-K006 の欠品に伴う 代替品ご使用のお願い

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平素よりご愛顧賜っております「血液浄化用回路 KMT-K006(規格変更後品)」につきまして、諸般の事情により国内入庫に遅れが生じております。それに伴い、在庫が欠品する見込みになります。つきましては、次回入荷時期と代替品についてご案内申し上げます。

大変ご迷惑お掛け致しますが、何卒ご理解とご容赦の程、宜しくお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

1. 対象製品

一般的名称	多用途血液処理用血液回路（腹水濾過濃縮用血液回路）
販売名	血液浄化用血液回路
品番	KMT-K006
医療機器承認番号	21500BZZ00312000
共通商品コード(JAN)	4987488087432
製造販売業者	S B カワスミ株式会社

2. 次回供給可能時期

2022 年 3 月中旬頃

※次回より品番変更になり、「KMT-K006A」として出荷させていただきます。

品番変更に伴い、共通商品コード(JAN)が変更になります。

変更後共通商品コード(JAN) : 4987488089979

3. 代替規格

KMT-K006(規格変更前品)+EXT-167(延長チューブ)

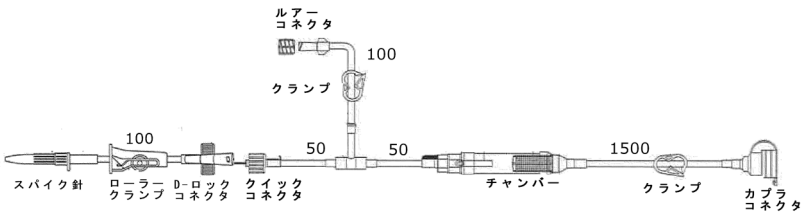
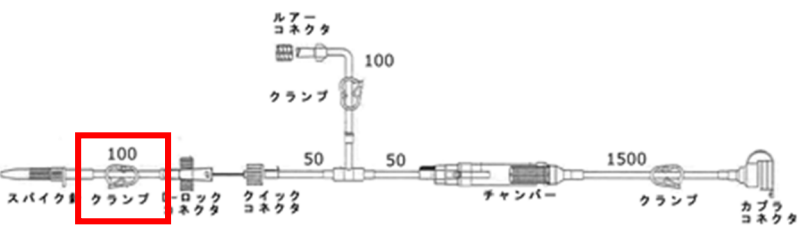
4. 代替品の相違点と使用方法について

回路接続時(プライミング時)に EXT-167(延長チューブ)を接続の上、ご使用ください。

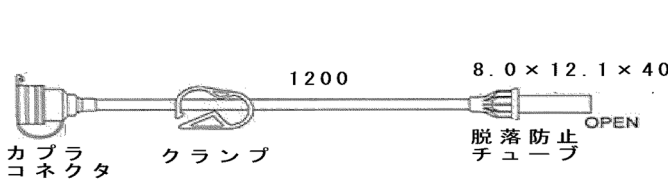
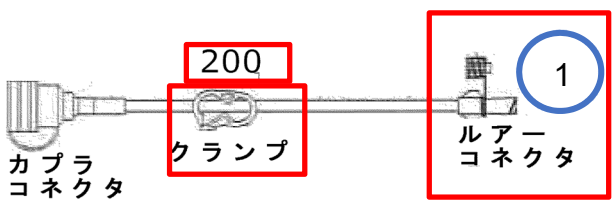
※詳細は EXT-167 使用方法をご覧ください。

○回路相違点 該当 = 赤四角箇所

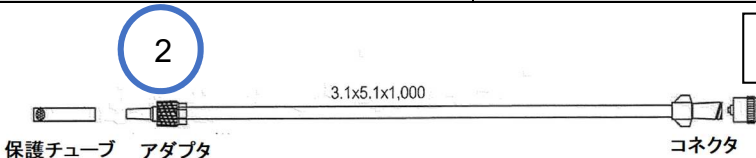
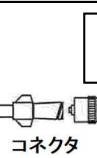
1.洗浄ライン/原腹水取込ライン

1 次包装:KMT-K006-1	洗浄ライン/原腹水取込ライン
<規格変更後>	
<規格変更前>	

2.排出ライン

1 次包装:KMT-K006-1	排出ライン
<規格変更後>	
<規格変更前>	

OEXT-167 使用方法

EXT-167	エクステンションチューブ
	

回路接続時に KMT-K006-1 排出ラインのルアーコネクタ部分 (=①) に EXT-167 のアダプタ部分 (=②) を接続してご使用ください。

以上