

2024年5月吉日

お客様各位

製造販売元：株式会社カネカ

販売元：株式会社カネカメディックス

KUSABI ご使用に当たっての注意事項のご連絡

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、臨床現場からのフィードバックを基に、改めて弊社製品「KUSABI」の使用方法について、注意喚起させていただくことになりました。主な事項は下記の3点です。

詳しくは、添付文書及び「使用手順と注意事項」（ポスター）をご確認頂き、引き続き適正使用の継続にご理解の程宜しくお願い致します。

敬具

記

注意喚起事項

1) 保護チューブ取り外し

術前準備として使用前に保護チューブは必ず抜去いただくようお願い致します。


<添付文書記載内容>

【使用方法等】1. 術前準備

- (1) 本品を無菌的かつ破損が生じないように注意深く包装容器から取り出した後、保護チューブ等の保護部材を取り外す。

※ 尚、現在保護チューブは青色と薄青色の2種類の材料が混在しておりますので改めてご注意くださいようお願い致します。

・ KUSABI バルーン保護チューブ (2種類)

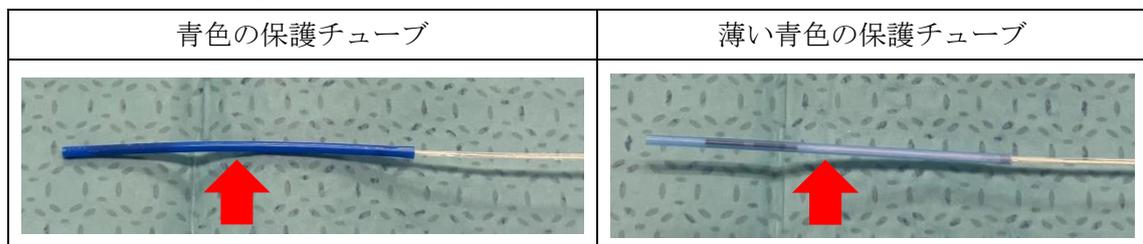


2) ガイディングカテーテル内のエア排除

ガイディングカテーテル内のエアは必ず排除していただきますようお願い致します。

<添付文書記載内容>

【警告】2. 本品の拡張によりガイドワイヤーを固定した後に抜去又は挿入する OTW 型カテーテル等を操作する際は、Y アダプターからエアを引き込むことがあるため、手技を続行する前に必ず Y アダプターのエア抜きを行い、血液が逆流することを確認すること。[エアによる血管塞栓から重篤な有害事象に至るおそれがある]

ガイドワイヤーカテーテル内のエア排除について（参考図）

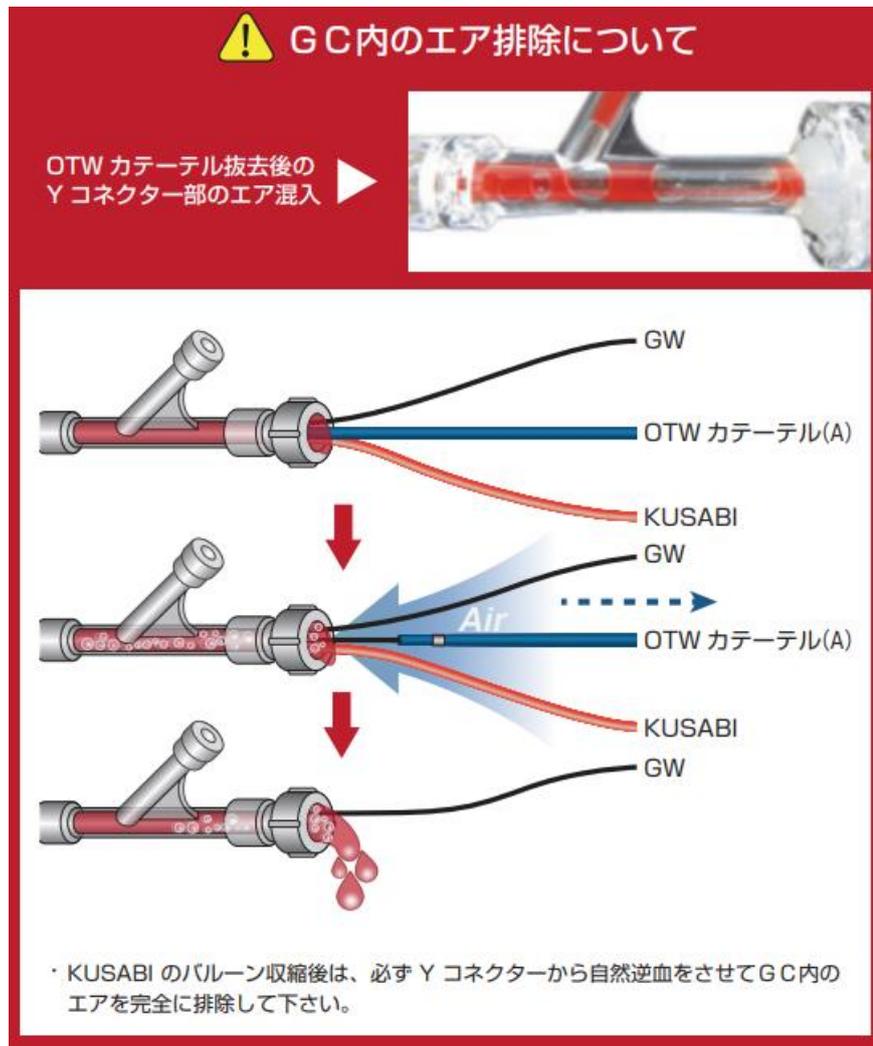

3) サイドホール付きガイドワイヤーカテーテル内での拡張禁止

サイドホール付きガイドワイヤーカテーテル内のサイドホール部でのバルーン拡張をしないようお願い致します。

〈添付文書記載内容〉

【使用上の注意】〈重要な基本的注意〉

12. ガイドワイヤーカテーテルのサイドホール部で本品のバルーンを拡張しないこと。

[本品のバルーンが破損し破裂するおそれがある]

以上