

\* 2017年6月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

2010年2月作成（第1版）

品目番号 12B1X10009000010

医療用品（4） 整形用品  
一般医療機器 手術用被覆・保護材  
JMDN コード 34654000

再使用禁止

## アルジメルト

---

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### \* 【形状・構造及び原理等】

不織布にアルギン酸発泡体からなる吸収体を付したものの。

### \* 【使用目的又は効果】

術後創傷の被覆・保護に用いる。

### \* 【使用方法等】

創傷面を清潔にし、アルギン酸発泡体面（フィルム面の反対面）をあててテープ等で固定する。

### 【使用上の注意】

- ・傷に化膿や熱、腫れのある場合は使用しないこと。
- ・傷に固着したゲルは擦り取らず水道水又は滅菌生理食塩水等で洗い流すこと。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
- ・滅菌してあるので開封後はすみやかに使用すること。
- ・開封・破損・汚染等が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。

### \* 【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：直射日光及び高温の場所を避ける。
- ・有効期間：3年（当社データによる）

\*お問合せ先 光洋産業株式会社 電話番号：03-3252-1705

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

光洋産業株式会社

電話番号：0479-86-4141