

RheoCarna

レオカーナ

CLTI*治療に新たなオプションの誕生
直接血液灌流(DHP)型、LDL-C値の条件なく使用可能に

*包括的高度慢性下肢虚血



吸着型血液浄化器

医療機器承認番号：30200BZX00250000

◇ 機器の概要

LDL及びフィブリノーゲンの吸着による血液レオロジーの改善により、閉塞性動脈硬化症患者的末梢血循環の改善を導き難治性潰瘍を治療することを目的に使用する


◇ 治験成績

血行再建不適応の潰瘍・壊疽を有する閉塞性動脈硬化症患者に対して、治療開始後24週間の観察期間内で、


対象病変治癒率 **45.9%**

一般社団法人 日本フットケア・足病医学会策定「閉塞性動脈硬化症の潰瘍治療における吸着型血液浄化器に関する適正使用指針 第1版 (2021年)」より抜粋

◇ 回路接続例

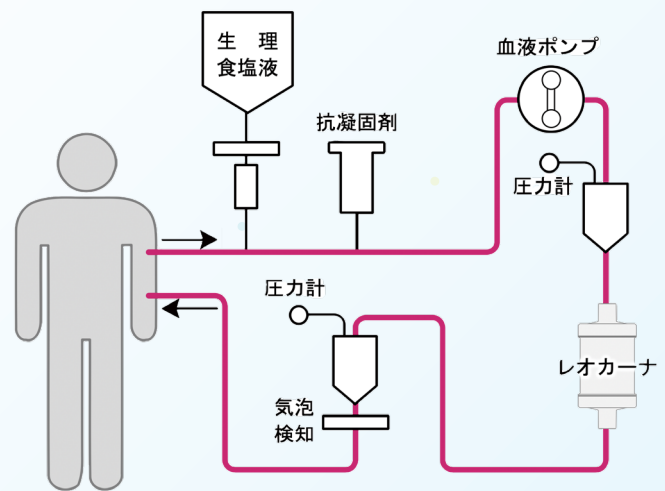

◇ 病診連携における治療スケジュール例

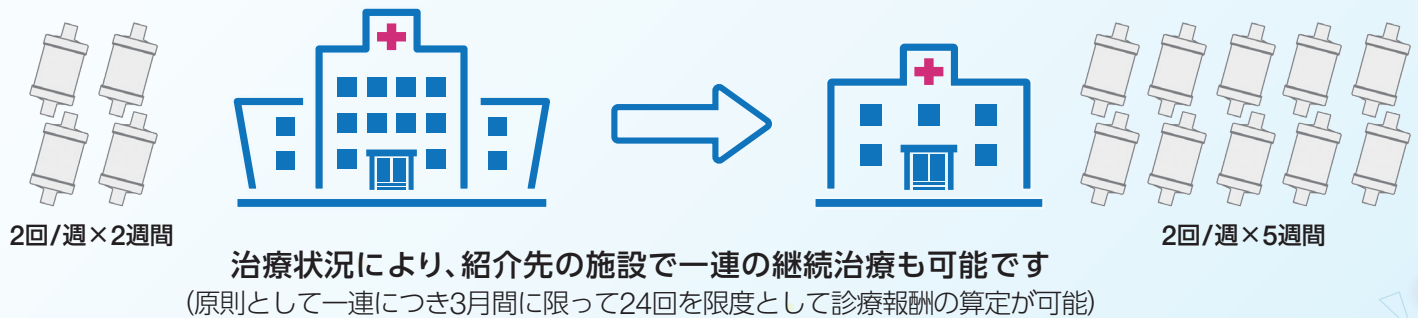

◇ 償還価格・技術料等

◆ 保険償還価格 : 91,600円

◆ 技術料 : 1,680点

※ K000創傷処理の2の所定点数を準用

◇ 添付文書より抜粋

【警告】 患者の状態により本品の治療効果が十分に得られない可能性を考慮し、関連学会の作成する適正使用指針を遵守した上で、血液浄化療法に関する十分な知識・治療経験を有する医師と、閉塞性動脈硬化症の治療及び創傷管理を行う医師らによる複数診療科(施設内外問わない)の連携のもと患者を選択すること。また、本品による治療効果を慎重に評価し、本品の使用の継続又は中止を判断すること。

i 使用上の注意:必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

※「レオカーナ」「Rheocarna」は株式会社カネカの登録商標です。

【製造販売元】

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

【販売元】

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060