

健保適用



吸着型血液浄化器

医療機器承認番号：20600BZZ00329000

S-15

S-25

S-35

全自動コンソール対応

各社コンソールで同時洗浄が可能となりました

対応機種についてはカネカメディックスのホームページまたは営業担当者まで



特 長

1. 高いβ₂-ミクログロブリン (β₂M) 吸着性能をもっています。
2. 血液成分に与える影響はわずかです。
3. 吸着器による圧力損失が少なく、操作が簡単です。
4. 透析と同時に治療が行えます。


適 応 症

透析アミロイド症

ただし、高度の運動障害などにより、日常生活が著しい制限を受けている重篤な患者を対象とします。(保険適用の可否については別紙をご参照ください)

使用 例


リクセルを使用する際の回路の一例を示します。

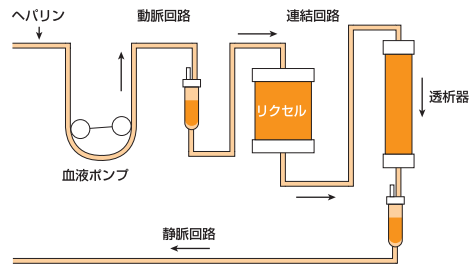

性 能


症例1. リクセルとPS膜を併用

凡例: ◆ A側 ▲ V側 <データ提供: 慈恵会相澤病院>

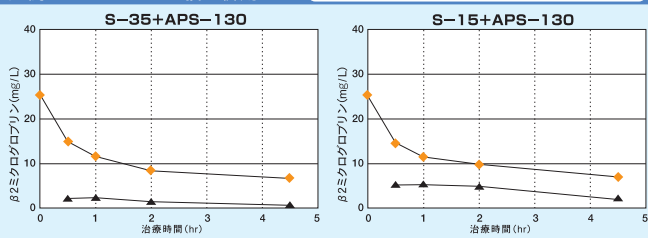


症例2. リクセルとPS膜を併用

凡例: ◆ A側 ▲ V側 <データ提供: 新潟市社会事業協会信楽園病院>

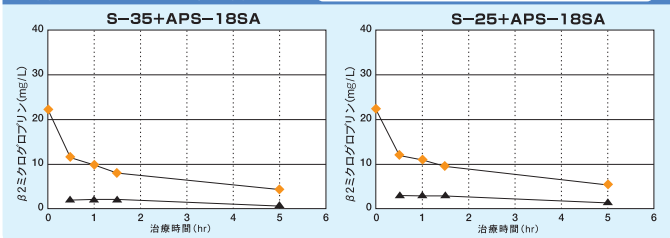


症例3. リクセルとPMMA膜を併用

凡例: ◆ A側 ▲ V側 <データ提供: 昭和会音羽病院>

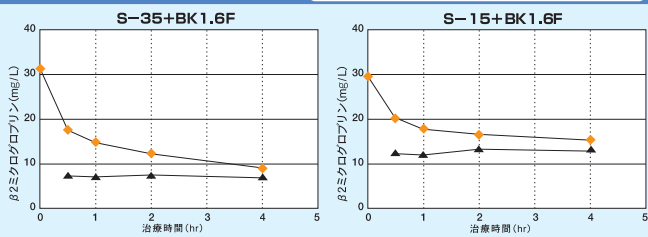


症例4. リクセルとPMMA膜を併用

凡例: ◆ A側 ▲ V側 <データ提供: 新潟市社会事業協会信楽園病院>

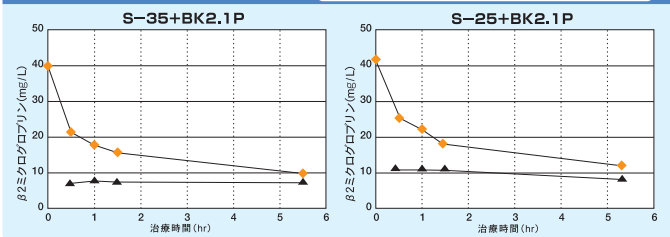

リクセルの血清成分への影響 (in vitro)

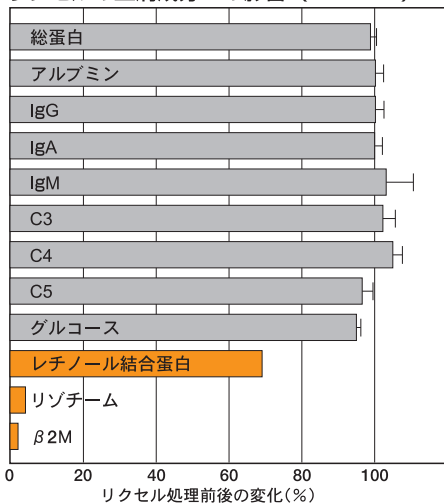

■ 健康人血清 (n=3) ■ 透析患者血清 (n=1)

バッチ法: 血清/吸着体=6 (v/v)、37°C、2時間インキュベート
変化 (%) = (吸着後濃度 / 吸着前濃度) × 100

<株式会社 カネカ 社内データ>

仕 様

カタログ番号	S-35	S-25	S-15
JANコード	4993478010045	4993478010069	4993478010052
吸着体	ヘキサテシル基をリガンドとするセルロースビーズ (350mL)	ヘキサテシル基をリガンドとするセルロースビーズ (250mL)	ヘキサテシル基をリガンドとするセルロースビーズ (150mL)
容器材質	ポリプロピレン (内寸: 70mm 径 × 90mm 高さ)	ポリプロピレン (内寸: 62mm 径 × 85mm 高さ)	ポリプロピレン (内寸: 50mm 径 × 76mm 高さ)
滅菌法	高圧蒸気滅菌		
充填液	クエン酸とクエン酸ナトリウムの混合水溶液		

添付文書からの抜粋

【操作方法又は使用方法等】

本吸着器は、原則として透析器と直列に接続して使用する。治療に際しては使用前に洗浄を行い、一回の治療に限り使用し、再使用はしない。

【効能又は効果に関連する使用上の注意】

一般の患者には、S-35 (充填容積350mL) を使用する。

ただし、S-35の使用により体外循環血液量が増加し、そのことによる副作用をおこすか、あるいはおこす危険性が高いと考えられる以下の患者については、医師の判断によりS-25 (充填容積250mL) を使用することが望ましい。

更に、S-25の使用に際しても副作用が見受けられる下記の患者については、医師の判断によりS-15 (充填容積150mL) を使用することが望ましい。

60才以上の高齢者、合併症 (低血圧、心不全) のある患者

透析治療の際に昇圧剤を必要とする患者等

【使用上の注意】

使用注意一次の患者には慎重に適用すること。

- 重症の心不全、急性心筋梗塞、重症の不整脈、急性脳卒中、または重症の管理困難な高血圧又は低血圧など、体外循環療法が困難な患者。
- 本吸着器を使用した場合に体外循環量がその患者の循環血液量と比べて多すぎような患者。特に体重40kg以下の患者。

重要な基本的注意

・透析療法の経験を有する医師が使用すること、または資格を有する医療従事者がその医師の指示に従って使用すること。

・治療中は、医師または資格を有する医療従事者が常に患者を観察すること。

・本吸着器の使用後は、速やかにかつ環境を汚染しないよう各施設の基準に従って処理すること。

臨床検査結果に及ぼす影響

・β₂MG以外に、リゾチーム、レチノール結合蛋白を吸着することが実験的に認められている。

使用にあたっては、必ず添付文書をご覧ください。

製造販売元

株式会社 カネカ

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

TEL.06-6226-5256

販売元

株式会社 カネカメディックス

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー) TEL.050-3181-4060