

** 2017年6月改訂（第6版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2013年1月改訂（第5版）

* 届出番号 : 09B1X00004000111

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 排液バッグ 70308000

シラスコン®閉鎖式排液バッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止


**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ** ●鉗子等の金属製器具でミルキングを行わないこと。[液漏れや、切断の恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

<本品の基本構成>

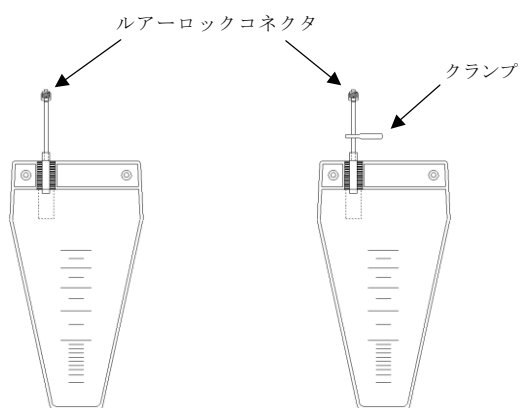

クランプ無 (781-1N)

クランプ付 (781-2N)

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。

[使用期限]

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

**【販売元】

株式会社 カネカメディックス
電話番号 050-3181-4100

【使用目的又は効果】

- 脳室ドレナージの排液バッグとして使用する。

【使用方法等】

1. 本品のルアーロックコネクタ（オス：白色）と、血腫等のドレナージ用カテーテルのコネクタとを接続する。
2. 症例、病態に応じた排出量を勘案し、適正な高さに設定して本品を使用すること。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 本品は設置位置により排液量に変化するため、適正な高さに設置すること。
2. 本品はシラスコン®脳室ドレナージ回路と接続できないので注意すること。