

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 70306000
シラスコン® <ラジオペーク>ペンローズドレーン

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- ・本品を絹糸等で皮膚固定した場合は、固定部位を適宜確認すること。〔固定部位から切断し、体内に脱落することがある。〕

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

<Aタイプ>

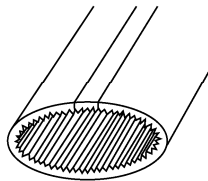

<Fタイプ>

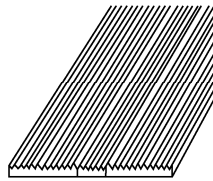

2. 材質

シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

体内に留置して手術後の排液を体外に誘導するために用いる。

【使用方法等】

1. 術後、熟練した医師により滲出液の最も貯留しやすい部位にドレーンチューブの先端を留置する。
2. 皮膚刺入部で、絹糸を用いて縫合し、さらに手術用テープ等で皮膚に固定する。
3. ドレーンチューブ後端部を滅菌ガーゼなどのドレッシング材で保護する。

** 【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 皮膚固定する際、ドレーンチューブに直接針糸をかけないこと。

【使用上の注意】

** 【不具合・有害事象】

本品の使用に伴い、以下の不具合が発生する可能性がある。

1. 重大な不具合
 - ・ドレーンチューブの切断
 - ・ドレーンチューブの閉塞
 - ・ドレーンチューブの抜去困難

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。

1. 重大な有害事象

- ・異物作用
- ・逆行性感染
- ・腹腔内脱落
- ・癒着
- ・イレウス
- ・創の瘢痕

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。

【有効期間】

外箱に使用期限を記載。〔自己認証（当社データ）による〕

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

名 称：株式会社カネカ

電話番号：06-6226-5256

【販売元の氏名又は名称等】

名 称：株式会社カネカメディックス