

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 排液用チューブ 14191102  
シラスコン®医療用チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

カタログ番号	内径-外径 (mm)	タイプ
100-00N	0.5-1.0	SH
100-0N	1.0-1.5	SH
100-1N	1.0-2.0	SH
100-2N	2.0-3.0	SH
100-11N	8.0-14.0	SH

2. 材質

シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

腔、創傷又は感染部位から浸出液又は膿状物質の除去に用いる。

【使用方法等】

1. 使用目的に合わせチューブを適当な長さに切る。
2. 使用前に必ず洗浄し、高圧蒸気滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌を行なう。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 長さ調節(切断)以外はチューブを加工しないこと。
2. 日本薬局方の条件に基づいて滅菌を行なうこと。

【使用上の注意】

[相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)]

併用注意(併用に注意すること)

1. 本品は、水溶性物質に影響を受けることはないが、エーテル、クロロホルム、ベンゼン、キシレン等の溶剤によって膨潤するので注意すること。
2. 本品は、弱酸や弱塩基に対して著しく変化はしないが、濃酸や濃塩基によっては劣化し破壊に至るので注意すること。

\*\* [不具合・有害事象]

本品の使用に伴い、以下の不具合が発生する可能性がある。

1. 重大な不具合
  - ・チューブの切断
  - ・チューブの閉塞
  - ・チューブの抜去困難

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。

1. 重大な有害事象
  - ・組織・血管の損傷
  - ・破断片の体内遺残
  - ・挿入部位からの感染

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 開封後の未使用のチューブは再密封して保管すること。

\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

名称: 株式会社カネカ  
電話番号: 06-6226-5256

[販売元の氏名又は名称等]

名称: 株式会社カネカメディックス