

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 排液用チューブ 14191102

## シラスコン®〈ラジオペーク〉医療用チューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状、構造

カタログ番号	内径－外径（mm）	タイプ
100-3R	2.5－4.0	SHR
100-4R	4.0－5.5	SHR
100-5R	5.0－7.0	SHR
100-6R	6.0－8.0	SHR
100-7R	7.0－9.5	SHR
100-8R	8.0－11.0	SHR
100-9R	8.0－12.0	SHR
100-10R	10.0－14.0	SHR

##### 2. 材質

シリコーンゴム

#### 【使用目的又は効果】

腔、創傷又は感染部位から浸出液又は膿状物質の除去に用いる。

#### 【使用方法等】

1. 使用目的に合わせチューブを適当な長さに切る。
2. 使用前に必ず洗浄し、高圧蒸気滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌を行なう。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 長さ調節（切断）以外はチューブを加工しないこと。
2. 日本薬局方の条件に基づいて滅菌を行なうこと。

#### 【使用上の注意】

[相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）]

併用注意（併用に注意すること）

1. 本品は、水溶性物質に影響を受けることはないが、エーテル、クロロホルム、ベンゼン、キシレン等の溶剤によって膨潤するので注意すること。
2. 本品は、弱酸や弱塩基に対して著しく変化はしないが、濃酸や濃塩基によっては劣化し破壊に至るので注意すること。

#### \*\*【不具合・有害事象】

本品の使用に伴い、以下の不具合が発生する可能性がある。

1. 重大な不具合  
・チューブの切断  
・チューブの閉塞  
・チューブの抜去困難

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する可能性がある。

1. 重大な有害事象  
・組織・血管の損傷  
・破断片の体内遺残  
・挿入部位からの感染

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 開封後の未使用のチューブは再密封して保管すること。

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

名称：株式会社カネカ  
電話番号：06-6226-5256

[販売元の氏名又は名称等]

名称：株式会社カネカメディックス